



DongGuan ORK Rubber Products Co., Ltd.

SILIKONOWA PODKŁADKA TRENINGOWA DO ZAKŁADANIA SZWÓW CHIRURGICZNYCH

Material: Silicone

Size: 13.6 x 9.6 x 0.8cm

Waga: 98.5 g




Techniki szycia chirurgicznego

Podkładka do ćwiczeń szycia zawiera kilka rodzajów ran. Można na niej trenować następujące techniki:

1. Szew pojedynczy przerywany (simple interrupted suture):

Najprostsza i najczęściej stosowana technika. Każdy szew jest pojedynczo wiązany. Stosowana do szycia skóry, tkanki podskórnej, mięśni, rozciągniętych, szczególnie w ranach zakażonych.

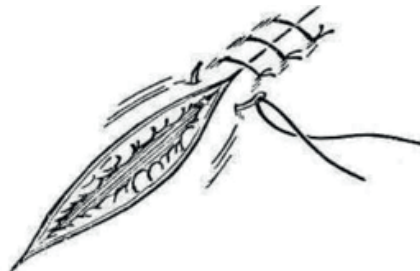

2. Szew ciągły (continuous suture):

Po wykonaniu pierwszego wklucia cały kanał rany zszywa się jednym odcinkiem nici.

Przed zakończeniem pozostawia się jeden koniec nitki, który wyprowadza się na przeciwną stronę, aby umożliwić zawiązanie podwójnego węzła.




3. Szew ciągly przetykany (continuous locking suture):

Technika oszczędza czas, daje dobry efekt hemostatyczny.

Nić przeplatana jest w każdym kolejnym przejściu.


Najczęściej stosowana przy zamykaniu końców przewodu pokarmowego lub podczas przeszczepów skóry.

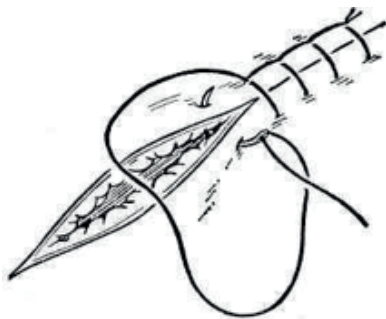

4. Szew w kształcie „8” (figure-of-eight suture):

Składa się z dwóch szwów przerywanych.


Zapewnia mocne i szybkie zamknięcie, np. przy szyciu powięzi.

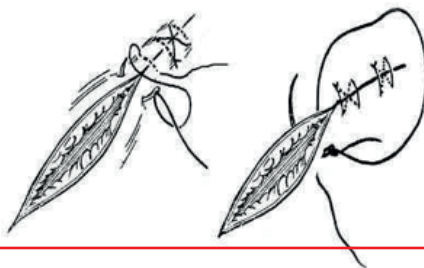

5. Szew podskórny (subcuticular suture):

Iglę wprowadza się na jednym końcu rany i prowadzi naprzemiennie przez wewnętrzne brzożgi obydwu stron nacięcia.

Stosowany głównie przy szyciu ran w miejscach widocznych, np. po tyreoidektomii.

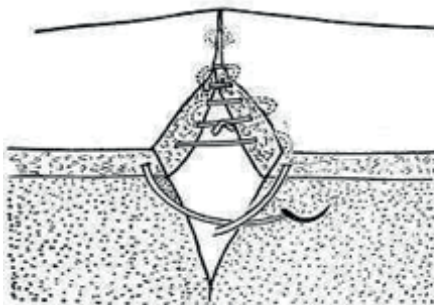

Informacje o produkcie:

Marka: ORK Rubber products Co., Ltd.

Model: Suture Practice Pad

Kod producenta: ZC-020

Skala: 1:1

Producent:

Nazwa: ORK RUBBER PRODUCTS CO., LTD

Adres: No. 11, Xingguo Road, Dongkeng Town,
Dongguan City, Guangdong Province, China,
523000 DongguanMade in China

Importer:

Nazwa: GRAPH GROUP Vitalii Lutskov

Adres: 02-758, Warszawa, Polska, al. Sikorskiego 18

Email: info@graphgroup.pl

Web: www.graphgroup.pl

